



BD Microtainer®


Contact-Activated lancet

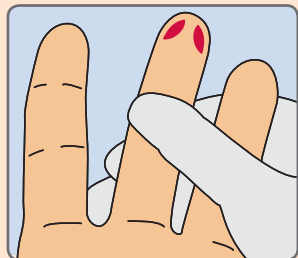


1 Bepaal de gewenste punctieplaats (binnen het gemarkeerde gebied) en ontsmet zorgvuldig volgens de richtlijnen van uw instelling.

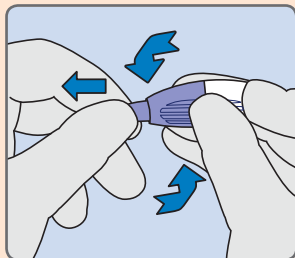


2 Draai het lipje af enwerp het weg.

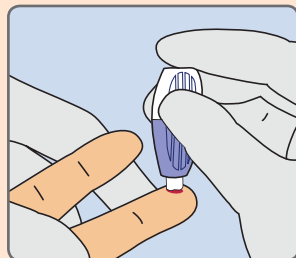


3 Neem het BD Microtainer® Contact-Activated lancet tussen de vingers en plaats het tegen de gewenste punctieplaats.

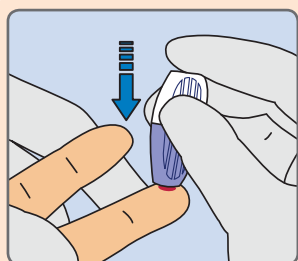

4 Om het te activeren, druk het veiligheidslancet stevig tegen de punctieplaats. Verwijder het lancet pas nadat u een klik hebt gehoord.

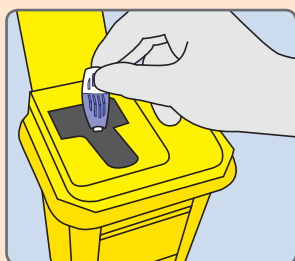

5 Gooi het veiligheidslancet weg in een goedgekeurde naaldencontainer. **NIET GESCHIKT VOOR HERGEBRUIK.**

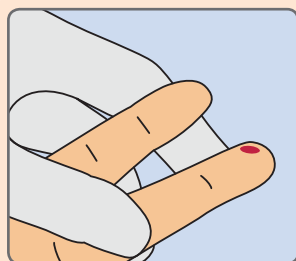

6 Neem het monster af volgens de richtlijnen van uw instelling.



BD Diagnostics
Preanalytical Systems

Selecteer het lancet dat het beste aan uw behoeften voldoet

De aandoening van de patiënt en de warmte van de punctieplaats kunnen de monsterhoeveelheid beïnvloeden

Lage bloedflow

Catalogusnummer: 366592

- Diepte: 1.5 mm
- Naald: 30G (0.31mm)

Is aanzienlijk minder pijnlijk voor uw patiënten dan vergelijkbare producten¹



Middelmatige bloedflow

Catalogusnummer: 366593

- Diepte: 1.8 mm
- Naald: 21G (0.81mm)



Hoge bloedflow

Catalogusnummer: 366594

- Diepte: 2.0 mm
- Naald: 1.5 mm

Maakt een afname van 500 µL via éénmalige punctie mogelijk²



Afnametips

Zie richtlijnen van het Clinical and Laboratory Standards Institute voor aanbevelingen betreffende de afname van diagnostische capillaire bloedmonsters.*

*NCCLS 2004 Doc. H4-A5 Vol. 24, No. 21

www.bd.com/vacutainer



BD Diagnostics

Preanalytical Systems

Becton Dickinson Benelux nv
Erembodegem-Dorp 86
B-9320 Erembodegem
Ondernemingsnr 0400.292.967
t. + 32 (0)53 720 556
f. + 32 (0)53 720 333
Email: info.benelux@europe.bd.com
www.bd.com/be

Becton Dickinson bv
Postbus 2130
NL-4800 CC Breda
KvK 28065261
btw NL 0011 26 751 801
t. + 31 (0)20 582 94 20
f. + 31 (0)20 582 94 21
Email: info.benelux@europe.bd.com
www.bd.com/nl

Referenties

1. Klinische documentatie BD VS7499 2. Klinische studie BD

Gebruikershandleiding voor BD Microtainer® Contact-Activated Lancet, EA, 040512, 01, EN

BD, het logo van BD en alle andere handelsmerken zijn het eigendom van Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD.