



TechniCare
Improving Healthcare



Crib Cosy

Gebruikershandleiding

INDEX

1.	Introductie	3
1.1.	Beoogd gebruik.....	3
1.2.	Veiligheid	3
1.3.	Garantie.....	4
2.	Gebruikshandleiding	5
2.1.	Openklappen zijwanden	5
2.2	Inklappen zijwanden	5
2.3	Remmen.....	5
2.4	Plaatsing over het bed.....	5
3.	Product details	7
4.	Technische gegevens.....	8
2.	Service & onderhoud	9
4.1.	Schoonmaak	9
2.2.	Onderhoud	10
4.3.	Spare parts	10

Fabrikant

TechniCare Ridderkerk B.V.
 Nikkelstraat 24
 2984AM Ridderkerk
 +31 (0)85 0870 421
www.technicare.nl
info@technicare.nl

Explanation symbols

MD	Medical Device		Attention
UDI	Unique Device Identifier		Read User manual
REF	Article number		Date of production
SN	Serial number		Manufacturer
LOT	Batchnumber	 = kg	Max. user load

1. Introductie

1.1. Beoogd gebruik

De crib Cosy heeft een beoogd gebruik om de pasgeborene te positioneren in het wiegje van moment na geboorte tot het moment dat de baby zich zelfstandig kan draaien of bewegen. De crib Cosy heeft een beoogd gebruik om over het ziekenhuisbed gereden te worden, waarna de wanden zijwaarts per stuk ondergeschoven kunnen worden, om binding tussen moeder en kind te bevorderen. Het is toegestaan de Crib Cosy te gebruiken voor intern transport. Hierbij dienen ten allen tijde de zijwanden opgeklapt te zijn.

Het neerwaarts klappen van de zijwanden mag enkel gedaan worden door getrainde professionals in een ziekenhuiskamer. De crib Cosy mag met een neergeklapte zijwand enkel gebruikt worden boven het ziekenhuisbed.

De Crib Cosy is niet bedoeld voor (1) extern transport, (2) commode, (3) brancard, (4) opvangtafel of (5) operatietafel.

Fabrikant eist en schrijft voor dat voor gebruik de handleiding gelezen moet worden.

1.2. Veiligheid

Het is belangrijk de Crib Cosy veilig te gebruiken. Om de veiligheid te borgen moet de crib Cosy enkel gebruikt worden volgens het beoogd gebruik om onverantwoorde situaties te voorkomen.



Gebruik

- De Crib Cosy is niet geschikt om gebruikt te worden als transportmiddel om het kindje te verrijden over langere afstanden
- Tijdens transport moeten de zijwanden in de juiste en in staande positie zijn geborgd.
- Tijdens transport moet de zorgprofessional de crib Cosy aan de duwhendels verrijden.
- Het maximum gewicht van de crib Cosy is maximaal 15KG in totaliteit.
- Als de crib Cosy over het bed gereden wordt en boven het bed geplaatst is, mag het patiënt bed niet in hoogte versteld worden.
- Zorg ervoor dat de omgeving geschikt is zodat de wieg gebruikt te worden.
- Zorg ervoor dat tijdens gebruik wanneer de wieg niet over de moeder verreden is de zijwanden in bovenste positie zijn geplaatst
- Zorg ervoor dat tijdens gebruik, wanneer er niet verreden wordt, de Crib Cosy op de rem staat.
- Zorg ervoor dat tijdens transport er geen obstakels zijn hoger dan 4CM
- Zorg ervoor dat tijdens transport bij obstakels lager dan 4CM de crib Cosy achteruit over de obstakels verreden wordt.
- De Crib Cosy mag enkel gebruikt worden voor intern transport.
- De crib Cosy mag enkel gebruikt worden in een schone en klinische omgeving.

Onderhoud

- Het product dient een jaarlijkse onderhoudsbeurt te hebben op
 - Beschadigingen in coating
 - Beschadigingen van het Polycarbonaat
 - Status van de matrassen
 - Status van de wielen

- Na elk gebruik dient het product gereinigd te worden conform schoonmaakprotocol.
- Het vervangen van onderdelen mag enkel gedaan worden door geautoriseerde personen
- Als het gebruik beschadigd is door verkeerd gebruik, extern transport, verkeerd onderhoud dient het product geretourneerd te worden naar fabrikant en niet meer gebruikt te worden.

1.3. Garantie

- Standaard garantie op product is 24 maanden
- Standaard garantie op de wielen is 12 maanden.

2. Gebruikshandleiding

2.1. Openklappen zijwanden

De zijwanden van de crib Cosy kunnen op en neer geklapt worden, zodat de moeder beter bij haar baby kan. De werkwijze om dit uit voeren voor het op en neerklappen van de zijwanden is als volgt:

1. Pak de zijwand vast aan de gekleurde as aan de zijkanten
2. Lift de zijwand omhoog om de zijwand uit het veiligheidsmechanisme
3. Lift de zijwand naar u toe.
4. Zorg ervoor dat de onderste as van de zijwand verder loopt in de geleiding onder de crib Cosy.
5. U heeft de mogelijkheid de zijwand geheel onder het matras te schuiven.



Er kan één wand tegelijk neergeklapt en ondergeschoven worden. Laat ten alle tijden de andere wand omhoog staan!

2.2 Opklappen zijwanden

1. Pak de zijwand vast aan de gekleurde As van de wand die onder geschoven is.
2. Trek de zijwand onder het matras vandaan, totdat de as in aan het eind van de sleuven is.
3. Plaats de zijwand bovenin het veiligheidsmechanisme
4. Zorg ervoor dat de zijwand goed in het veiligheidsmechanisme valt
5. Controleer of de zijwand goed geborgd is.

2.3 Remmen

Alle vier de wielen bevatten een rem. Om de wielen te remmen moet u ervoor zorgen dat het rode rempedaal naar beneden is gedrukt.



Tijdens gebruik dienen de wielen geremd te zijn om te voorkomen dat de crib Cosy kan verrijden.

2.4 Plaatsing over het bed

De crib Cosy heeft de mogelijkheid over het bed gereden worden. Volg om de crib Cosy over het te plaatsen de volgende stappen.

1. Controleer de ruimte onder het bed of er geen obstakels zijn waar de crib Cosy tegenaan kan lopen.
2. Plaats het bed van de moeder bij voorkeur in een zo laag mogelijke positie voordat de wieg over het bed geplaatst wordt.
3. Controleer of de crib Cosy vrij van de benen van de moeder is in hoogte.
4. Plaats de crib Cosy daarna over het bed totdat de staanders tegen het bed aan komen.
5. Zet de crib Cosy vast op de remmen zodat de crib Cosy niet verreden kan worden als het over het bed geplaatst is.
6. Bedien het patiënt bed tijdens het gebruik van de crib Cosy niet.



Bij het niet naleven van dit stappenplan kunnen er risico's optreden als val en stoot gevaar

2.5 Gebruik naast het bed

Naast dat de crib Cosy over het bed geplaatst kan worden kan de crib Cosy als staande wieg naast het bed geplaatst worden. Belangrijk is in deze situatie om de volgende punten in acht te nemen.

- Houd de zijwanden omhoog geplaatst als de wieg naast het bed geplaatst is
- Open de wanden alleen onder toezicht van de zorg professional

2.6 Vrijloop in hoogte (alleen bij Crib Cosy zonder hoogteverstelling)

De Crib Cosy zonder de hoogteverstelling is voorzien van een veiligheidsfunctie in de staanders. Door middel van gasveerdruk heeft de korf een vrijloop in hoogte. Dit betekent dat de korf, mocht deze klem komen te zitten, te allen tijde naar boven getild zal worden en het onderstel op de grond blijft staan. Hierdoor wordt kantelgevaar voorkomen.




De vrijloopfunctie mag nooit als hoogteverstelling gebruikt worden!



Controleer, als de korf eenmaal gelift is, of de korf weer in de laagste stand staat voor opnieuw gebruik!

3. Product details

Onderstaand vindt u de productdetails van de Crib Cosy.

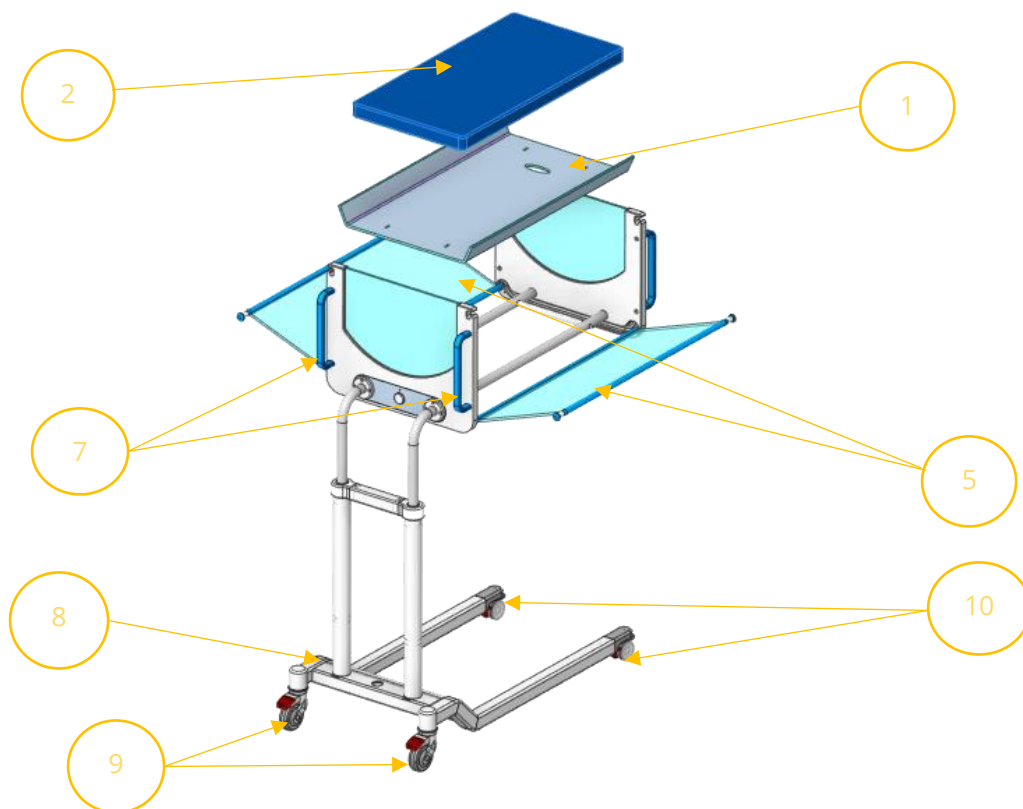

Bovenframe

- 1. Matras plaat
- 2. Matras
- 3. Voet einde
- 4. Hoofd einde
- 5. Zijkanten
- 6. Geleidingen voor zijwanden
- 7. handvatten

Foot


- 8. Voet
- 9. Wielen 75mm inclusief remmen
- 10. Wielen 50mm inclusief remmen

Technische gegevens


Materials

onderdeel	Material
Frame	Staal gestraald, dubbel laags gecoat RAL9010 RVS304, dubbel laags gecoat RAL9010
Handvatten	Aluminium, geanodiseerd
Voet-hoofdeinde	Pet-P
Zijwanden	Polycarbonaat
Hoogteverstelling (optioneel)	Gasveer
Din-Rail	RVS
Wielen	Zie data sheet

Afmetingen (Vaste hoogte)

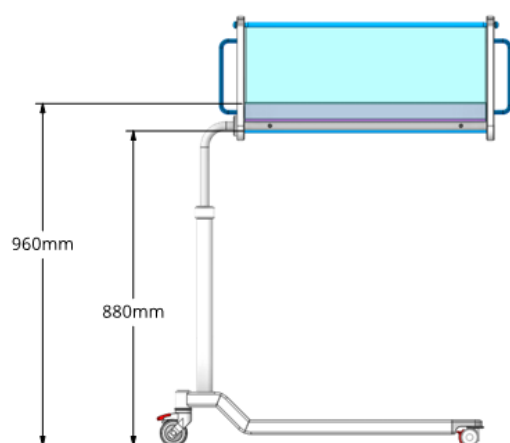

Afmeting (in hoogte verstelbaar (incl. 19.007.A003))

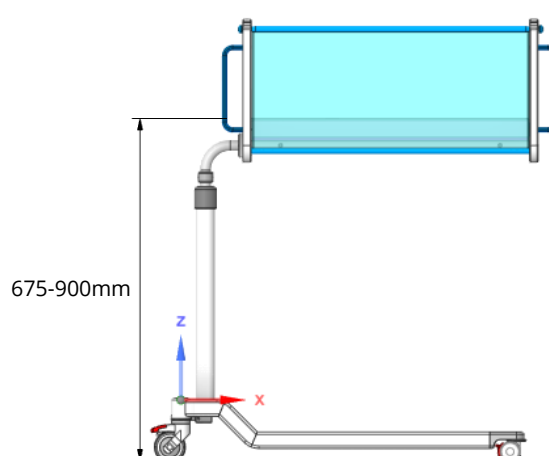

Matras

Lengte: 675 mm
 breedte: 350 mm
 Dikte: 50 mm

Crib Cosy buitenmaten

Lengte: 720 mm
 breedte: 450 mm
 Dikte: 305 mm

Crib Cosy binnenmaten

Lengte: 700 mm
 breedte: 425 mm
 Dikte: 200 mm

2. Service & onderhoud

4.1. Schoonmaak

Schoonmaakschema	
Na gebruik	Het schoonmaken van zowel het frame als het matras met water inclusief desinfectantia. De crib Cosy kan gereinigd worden met een vochtige doek. 
Maandelijks	Maandelijks dient een extra controle uitgevoerd te worden op schoonmaak. Hierbij dient u elk onderdeel extra nauwkeurig schoon te maken. Leg hierbij extra nadruk op: - Verwijderen matrasplaat en schoonmaken geleidingen - Schoonmaken matras zelf - Schoonmaken zijwanden - Controle op wielen en frame

Desinfectie

Controleer voorafgaand aan het schoonmaken of uw schoonmaakmiddel op onderstaande lijst is vermeld. Wanneer dit niet op de lijst vermeld is, Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Gebruik geen jodinktur voor het schoonmaken van het matras

Product naam	Hoeveelheid	Product naam	Hoeveelheid
Incidin Plus (Ecolab)	2%	Actichlor Plus (Ecolab)	1000 ppm
Kodan Tinktur Forte (Schulke)	Puur	Anios DDHS (Anios Laboratories)	Puur
Mikrobac Forte (Hartmann)	4%	B45 Orochemie)	Puur
Sodiumhypochlorite (Standaard)	1000 ppm	Bacillol 30 Foam (Hartmann)	Puur
Octenispert (spray) (Schulke)	Puur	Clinell Sporicidal Wipes (Garna Healthcare)	Puur
P3-topax 66 (Ecolab)	5%	Chlor-Clean tablets (Guest Medical)	1000 ppm
Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser)	Puur	Dettol (Reckitt Benckiser)	5%
Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)	Puur	Dismozon Pur (Hartmann)	4%
Spring (Kalle Original)	Puur	Formaldehyde (Pharmacy)	30%
Sprint 200 (Diversey)	2%	Germatol (Kiarah Chem)	5%
Suma Bac D10 (Johnson Diversey)	1%	Hansamed (spray) (Beiersdorf AG)	Puur
Surfa'Safe (Anios Laboratories)	Puur	Haz-Tabs (Guest Medical)	1000 ppm
Topmax 421 (Ecolab)	5%	Hibicet (Molnlycke Health Care)	Puur
Virkon (Du Pont)	10 g/l	Incidin Extra N (Ecolab)	2%
Volvone (Oyar)	40%		

2.2. Onderhoud

De Crib Cosy dient een periodieke onderhoudscontrole te ondergaan om de kwaliteit van het product te garanderen. Hierbij dient u het onderhoudsschema te volgen en alle stappen te doorlopen.

Onderhouds schema	Controle door	
Na gebruik	Afdeling / Zorgprofessional	- Visuele controle op onderdelen - Visuele controle op schade en krassen.
Wekelijks	Afdeling / Zorgprofessional	- Controle op wielen en remmen - Controle op verrijdbaarheid - Controle op zijwanden en veiligheidsmechanisme.
Jaarlijks	Afdeling medische techniek	- Visuele grondige inspectie op schade - Controle op stickers - Controle op schade - Controle op coating - Controle op fixatie van bouten en bevestigingsmaterialen - Controle op matras - Controle op fixatie wielen - Controle op werking remmen - Controle op zijwanden - Controle op werking zijwanden - Controle op werking zijwanden in combinatie met veiligheidsmechanisme.

4.3. Spare parts

Onderstaand vindt u de spare parts. Reserveonderdelen en artikelnummers zijn op te vragen via uw contactpersoon.

Spare part	Vervangingsadvies
Wielenset achterwielen	48 maanden
Wielenset voorwielen	48 maanden
Stootwielen per set (4stuks)	48 maanden
Zijwand per stuks, standaard Turquoise	n.v.t.
Handvat per stuks, Kleur Turquoise	n.v.t.
Matrasplaat incl. bevestigingsblokjes	n.v.t.
Blokkeerbare gasveer hoogteverstelling	n.v.t.
Pedaal hoogteverstelling	n.v.t.
Voetschot excl. handvatten	n.v.t.
Kopschot excl. handvatten	n.v.t.

EG Verklaring van Conformiteit

Wij,

Technicare Ridderkerk BV

**Nikkelstraat 24
2984AM Ridderkerk
GS1 Company Prefix code: 87193273974**

verklaren hierbij dat het CE-gemarkeerde product waar deze verklaring betrekking op heeft,

Product: Crib Cosy
Accessoires: Zie pagina 2
Artikelnummer: 19.007.01
UDI-DI Code: 8720648522000
SRN Code: 8720648522000
NL-MF-000005899
GMN Code: 8719327397419.007.019T



Is geclassificeerd als:

Medisch hulpmiddel klasse I volgens Annex XIII, Hoofdstuk III.1 van Richtlijn EU/745 (MDR) met betrekking tot medische hulpmiddelen.

Het hulpmiddel dat onder deze verklaring valt is in overeenstemming van de verordening en voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening onder verantwoordelijke van de fabrikant:

EU 2017/745 (MDR) (Medische hulpmiddelen)

- NEN-EN 50637_2017
- EN60601-1:2006
- EN60601-1:2:2007
- NEN-EN-ISO 20417:2021

Producten die worden gedekt door deze Verklaring van conformiteit zijn toegevoegd aan de product referentielijst (zie bijlage I).

Handtekening:



Datum:

Naam: Arjan van de Voorde
Functie: Directeur



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

info@technicare.nl
www.technicare.nl

T +31 (0)180 499 276
KvK 24306225

IBAN NL20 ABNA 0621 2872 37
BTW nr. NL8194.72.359.B01

Bijlage I, Product referentielijst

Fabrikant	Artikelnummer	Specificatie	Klasse
TechniCare Ridderkerk BV	19.007.01	Crib Cosy	I
TechniCare Ridderkerk BV	19.007.A001	Crib Cosy matras	I
TechniCare Ridderkerk BV	19.007.A002	Crib Cosy DIN-Rail	I
TechniCare Ridderkerk BV	19.007.A003	Crib Cosy hoog/laag verstelling	I